

# Nasaleze®



## Кога да използвате Nasaleze PM Shield?

**Nasaleze PM Shield** е превантивно средство в борбата срещу съвременното замърсяване на въздуха в градската среда.

Използвайте **Nasaleze PM Shield** преди да навлезете в потенциално замърсена среда като превантивен начин да предпазите носа си от фините прахови частици (Particulate Matter, или т.нар. PM).

Фините прахови частици могат да съдържат множество различни химикали. Те са невидими за окото, нямат аромат, или вкус, но тези частици - особено PM<sub>10</sub>, или по-малките от тях могат да причинят големи вреди на човешкото тяло.

Множество учени откриват връзка между фините прахови частици и развитието на инфекции на горните дихателни пътища, алергии и астма.

Връзката между замърсения въздух и отключването на алергичен ринит става все по-осезаема. Предпазването от замърсяванията е важно за поддържането на добро здраве

Носът е „входната врата“ на горните дихателни пътища и като такъв има нужда от защита.

## Кой може да използва Nasaleze PM Shield?

**Nasaleze PM Shield** е подходящ за възрастни, спортисти, бременни жени, кърмачки и деца над 18 месечна възраст.

Пазете далеч от малки деца.

**Nasaleze PM Shield** не съдържа лекарствени вещества.

**Nasaleze PM Shield** има добър профил на безопасност.

**Nasaleze PM Shield** не причинява усещане за стичане в гърлото и даване.

## Как действа Nasaleze PM Shield?

**Nasaleze PM Shield** представлява прахообразен спрей за нос. След впръскване, при допир с носната лигавица, прахообразните целулозни частици образуват гелообразна защитна бариера, която „улавя“ и предпазва от фините прахови частици.

**Nasaleze PM Shield** съдържа аромат на лимон, който създава приятно и освежаващо цитрусово усещане.

Според ин витро клинично изпитване\*, **Nasaleze PM Shield** ефективно ограничава дифузията на фини прахови частици с размери от 2.5µm (PM 2.5) в продължение на до 6 часа.

*\*С цел определяне ефикасността на Nasaleze да действа като предпазна бариера срещу PM<sub>2.5</sub> в ин витро експериментални условия.*



**ВПРЪСКВАНЕ** → **СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЩИТНА БАРИЕРА** → **ЗАЩИТА СРЕЩУ ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ**

## Състав

• Натурален инертен целулозен прах от растителен произход и лимон

**Продуктът е подходящ за вегани.**

[www.nasaleze.bg](http://www.nasaleze.bg)

## Как да използвате Nasaleze PM Shield?

За да Ви предпазва от замърсяванията и фините прахови частици е необходимо да впръсквате **Nasaleze PM Shield** 2 до 3 пъти дневно. Всяко впръскване позволява поддържането на ефективна защитна бариера върху носната лигавица в продължение на до 6 часа.



1. Издухайте носа си



2. Отворете капачката и разклатете



3. Пръснете малко количество във въздуха, за да освободите налягането в бутилката. Това важи само за първата употреба, след това не е необходимо.



4. Поставете накрайника на спрея в началото на ноздрата и впръснете по 1-2 пъти във всяка ноздра. Вдишайте леко.




5. Впръскайте отново след всяко издухване на носа

По време на първата употреба може да усетите чувство на гъделичкане, или парене в носа, както и да започнете да кихате. Това е нормална реакция при първоначално ползване, която ще отmine, когато свикнете с употребата на **Nasaleze PM Shield**.

Понякога е възможно да усетите лек сърбеж, или дразнене, особено ако носната Ви лигавица е травмирана, или възпалена. Това усещане би следвало да отmine бързо.

Ако усещате сериозен дискомфорт след употребата на този продукт се консултирайте с Вашия лекар.

Ако употребявате успоредно друг спрей за нос, то **Nasaleze PM Shield** трябва да бъде впръскан отново след другия спрей, за да възстанови защитната бариера върху носната лигавица.

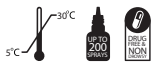

Производител: Nasaleze Ltd, Unit 3, Woodside House, Ballafletcher, Business Park, Douglas, IM4 4QE, Остров Ман, Великобритания



Atlantic Bridge, 19 Willowside, Woodley, Berkshire, RG5 4HJ, UK



## Как да съхранявате Nasaleze PM Shield?

- Не изплаквайте бутилката с вода, или друга течност, защото това може да запуши отвора.
- Не използвайте ако забележите, че целостта на опаковката е нарушена.
- Съхранявайте на стайна температура, или на температура между 5°C и 30°C.
- След отваряне на опаковката, използвайте съдържанието в рамките на 6 месеца.

### Противопоказания

- Продуктът не е подходящ за деца под 18 месечна възраст.
- Не използвайте **Nasaleze PM Shield** ако сте чувствителни към целулоза, или лимон.
- Избягвайте контакт с очите.
- Избягвайте контакт с отворени рани.
- Ако прахът от бутилката попадне в очите Ви, отмийте с вода.
- За да избегнете заразяване не споделяйте този продукт с други хора.
- Много малко случаи на алергични реакции са докладвани във връзка с този продукт. Те включват усещане за запушен нос, течаш нос, зачервено гърло, или кихане. Ако получите по-сериозна алергична реакция от изброените, прекратете незабавно употребата му и ако симптомите продължат се консултирайте с Вашия лекар.

**Дистрибутор:** Р и Ко Дистрибушън ЕООД,  
гр. София, бул. "Ген.Е.И.Тотлебен" 30-32  
email: riko.distribution@gmail.com;  
тел: 0889811335;